

Bedienungsanleitung Micu-Pocket mit Protokollen von Daniel Knebel

Version: 1.01 – Stand: 25.04.2025



Hinweise zu dieser Gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes.



Voraussetzung für die Verwendung des Geräts ist die Fähigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu verstehen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sowie ältere Menschen, die Hilfe benötigen, sollten das Gerät nur unter ständiger Überwachung eines Erwachsenen, welcher über die benötigten Fähigkeiten verfügt, verwenden. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch insbesondere das Kapitel „Weiterführende Hinweise und Informationen“ dieser Gebrauchsanweisung.

In dieser **Gebrauchsanweisung** verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	WARNUNG! / GEFAHR! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!		HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!		VORSICHT! Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!

Kurzbeschreibung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Micu-Pocket ist ein kompaktes und tragbares Gerät zur Mikrostromanwendung mit einem Stromkanal für den nicht-medizinischen Gebrauch. Es bietet einen Mikrostromkanal über welchen Stromstärken von bis zu 600 μA und Frequenzen im Bereich von 0,4 bis 999 Hz ausgegeben werden. Der Strom wird dabei über zwei Leitungen mit Klebeelektroden in den Anwender eingebracht. Das Gerät verfügt über 25 vorinstallierte Anwendungsprotokolle. Die Protokolle definieren sich durch folgende Parameter: Stromstärke, Frequenz, Anstiegszeit, Polarität.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt über vier kapazitive Tasten sowie ein 1"- OLED Display. Das Micu-Pocket ist mit einem Li-Ion Akku ausgestattet, welcher kontaktlos per „wireless charging“ nach Qi Standard geladen werden kann.



Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät keine Medizinproduktezulassung nach MDR besitzt und ausschließlich für den nicht-medizinischen Gebrauch bestimmt ist. Vor der Anwendung empfehlen wir dringend, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Benutzerverantwortung

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es entsprechend den in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Beschreibungen funktioniert, wenn es gemäß den zur Verfügung gestellten Anleitungen installiert, betrieben, gewartet und repariert wurde.

Ein defektes Produkt sollte nicht verwendet werden. Teile, die beschädigt, offensichtlich abgenutzt, unvollständig oder kontaminiert sind oder ganz fehlen, sollten umgehend ersetzt werden. Sollte eine Reparatur oder ein Austausch nötig sein, wird empfohlen, Servicearbeiten beim Hersteller durchführen zu lassen. Der Anwender des Produkts wird die alleinige Verantwortung für jegliche

Fehlfunktion, die aus unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Wartung, unsachgemäßer Reparatur, Beschädigung oder Änderung durch eine andere Person als der des Herstellers oder das autorisierte Kundendienstpersonal dieses Unternehmens herrührt tragen.

ACHTUNG wichtiger Sicherheitshinweis!



Beim Verbinden oder Einführen der am Körper angelegten Anschlussleitungen in Fremdgeräte oder zu Anwendern, die mit anderen Geräten verbunden sind besteht Lebensgefahr für den Anwender.



Verbinden Sie die Anschlussleitungen des Micu-Pocket nur mit den dafür vorgesehenen Buchsen am Micu-Pocket und führen Sie die Steckverbindungen der Anschlussleitungen in keine anderen Geräte/Steckdosen ein oder schaffen damit eine Verbindung zu anderen Anwendern.

Lieferumfang

Lieferumfang



Art-Nr.: **Bezeichnung:**

10219 Mikrostrom Gerät Micu-Pocket




9269 Anschlussleitung rot / schwarz



10408 Wireless Charger AGPTEK DW01 grau mit USB-Kabel

Allgemeine Eigenschaften

Anschlüsse & Ein / Aus Taste

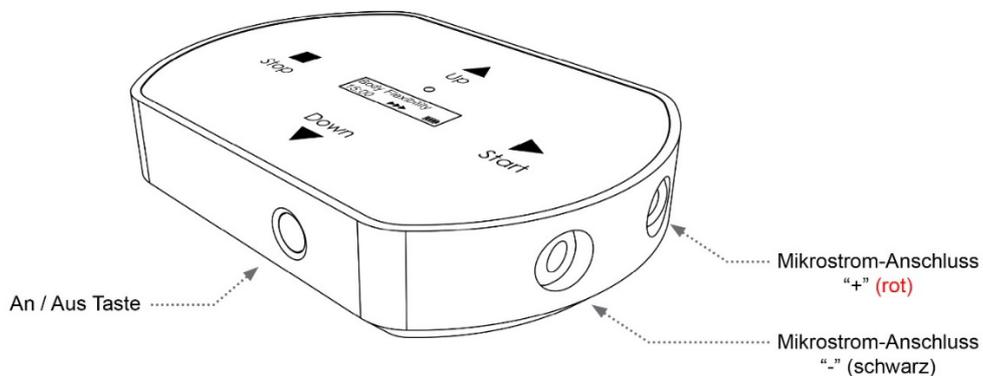


Wireless Charging

Um das Gerät kabellos aufzuladen, verwenden Sie bitte die mitgelieferte Ladeschale. Verbinden Sie die Ladeschale mit einem geeigneten USB-C-Netzteil oder einem USB-C-Port. Stellen Sie sicher, dass die Ladeschale fest angeschlossen ist.

Platzieren Sie das Gerät mittig auf der Ladeschale. Sobald der Ladevorgang beginnt, zeigt eine LED oberhalb des Displays durch Blinken an, dass das Laden läuft. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED dauerhaft leuchtet.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät während des Ladevorgangs nicht verwendet werden kann. Warten Sie, bis der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

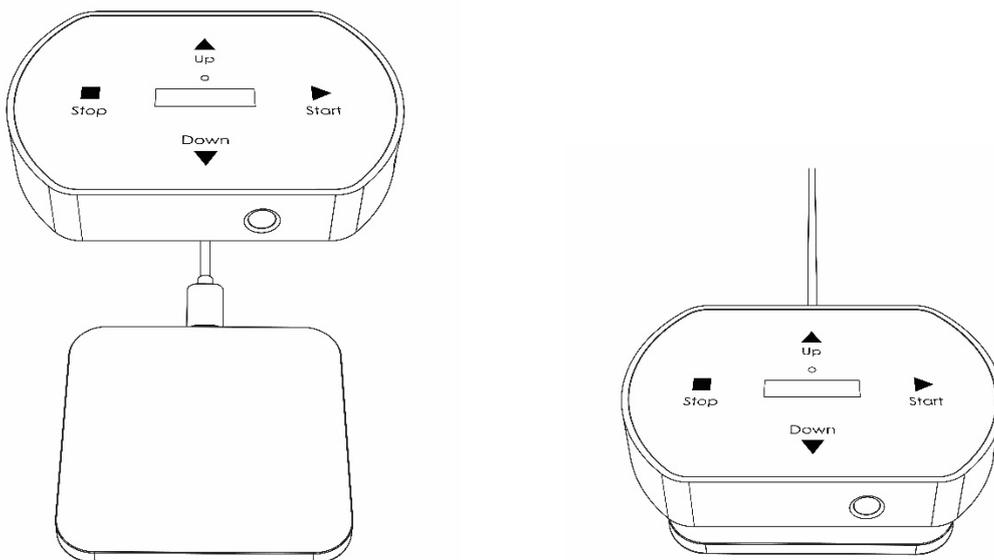


Anwender-Interface

Für eine einfache und selbsterklärende Bedienung ist das Gerät mit einem 1“ OLED-Display sowie mit vier kapazitiven Tasten ausgestattet. Um ein sicheres Ansprechen der Tasten zu erreichen, empfiehlt es sich die Tastenflächen mittig mit leichtem Druck zu berühren. Dabei ist nicht die Höhe des Drucks, sondern die Größe der berührenden Fläche das wesentliche Kriterium für das Erkennen der Taste. Die Reaktion erfolgt bei Berührung der Taste und wird durch ein akustisches Signal bestätigt. Nach dem eine Funktion per Tastendruck ausgeführt wurde ist es vor dem erneuten Drücken einer Taste entscheidend mit dem Finger eine gewisse Distanz (> 1,0 cm) zur Bedienoberfläche aufzubauen.

Erklärung der Tasten und Symbole

Übersicht Benutzeroberfläche

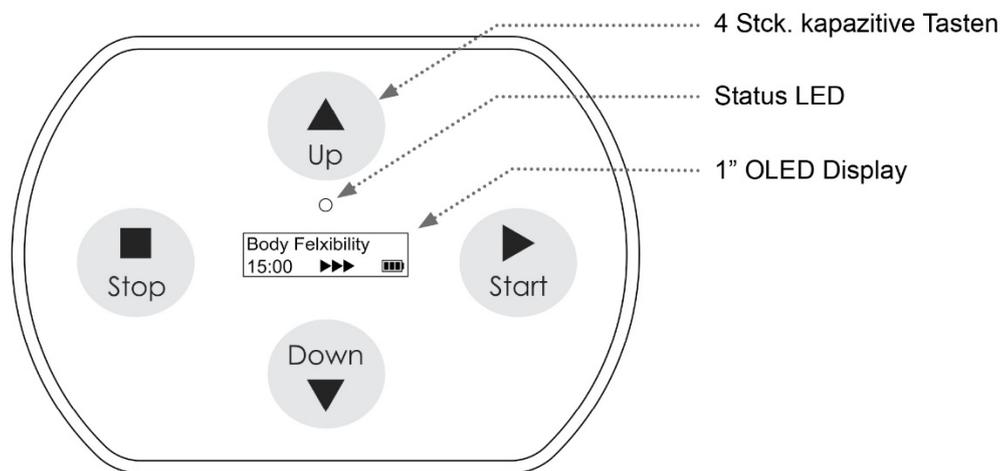

Tasten


Start

Start
Mit dieser Taste wird ein Programm gestartet.


Stop

Stop
Mit dieser Taste wird ein laufendes Programm gestoppt.



Up

Up
Mit dieser Taste wird in der Programmliste nach oben geblättert.


Down

Down
Mit dieser Taste wird in der Programmliste nach unten geblättert.

Anzeigen im Display

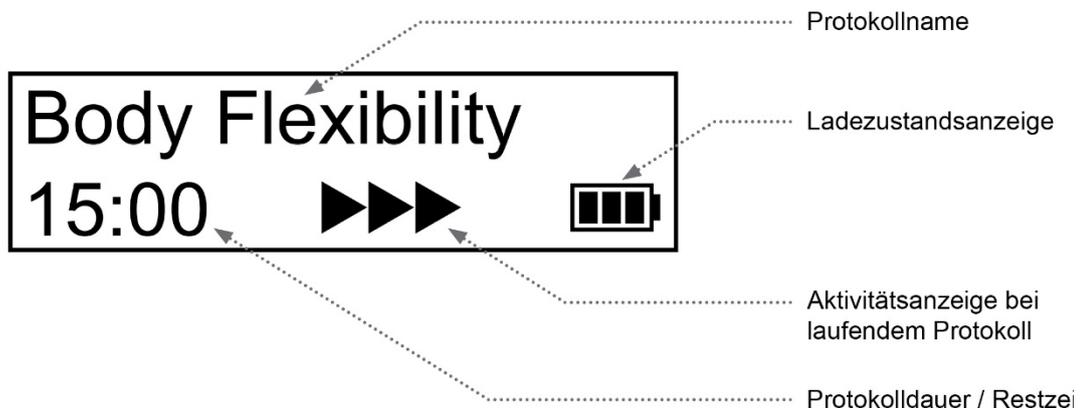

Ladezustandsanzeige
Gefüllt: Akku vollständig geladen



Ladezustandsanzeige
Ein Balken: : Ladezustand < 20%
Akku sollte geladen werden

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Micu-Pocket erfolgt durch Bestätigen des Tasters auf der Seite des Geräts. Nach dem Einschalten erscheint für wenige Momente der Startbildschirm mit dem MicuFlow-Logo. Anschließend wird das erste Programm der Programmliste angezeigt. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Protokoll auswählen und starten

Das Gerät verfügt über 25 Anwendungsprotokolle. Neben dem jeweiligen Protokoll wird in der Programmliste die Protokolldauer sowie der Ladezustand des Akkus angezeigt. Mit den Tasten Up und Down kann man in der Protokollliste navigieren.

Durch Tippen auf Start beginnt die Stromausgabe des ausgewählten Protokolls. Die angezeigte Zeit beginnt rückwärts abzulaufen. Auf dem Bildschirm zeigt eine Fortschrittsanimation an, dass ein Protokoll abläuft und Strom ausgegeben wird. Mit der Stopp-Taste kann die Anwendung beendet werden. Das Programmende wird durch ein Tonsignal angezeigt.

Programme und Elektrodenpositionen

1. **Happy Balance** Unterstützt ein harmonisches inneres Gleichgewicht und fördert eine ausgeglichene Stimmung.
2. **Mental Relax** Fördert mentale Entspannung und unterstützt dabei, den Kopf freizubekommen.
3. **Clear Brain** Unterstützt die geistige Klarheit und hilft, den Fokus zu schärfen.
4. **Morning Focus** Aktivierendes Programm für einen klaren und wachen Start in den Tag.
5. **Body Flexibility** Fördert die Geschmeidigkeit des Körpers und unterstützt die Beweglichkeit.
6. **Spine Balance** Unterstützt ein angenehmes Gefühl und die Balance im Bereich der Wirbelsäule.
7. **Joint Balance** Fördert ein ausgeglichenes Körpergefühl und mehr Balance im Bereich der Gelenke.
8. **Fascia Balance** Unterstützt das Wohlbefinden und die Geschmeidigkeit des Fasziengewebes
9. **Muscle Balance** Fördert ein harmonisches Zusammenspiel der Muskulatur.
10. **Bone Balance** Unterstützt das allgemeine Wohlbefinden im Bereich der Knochenstruktur
11. **Ice Bath** Ein erfrischendes Programm, das inspiriert ist von Kälteanwendungen.
12. **Breath Free** Fördert ein angenehmes Empfinden in der Atmung. Ein optimaler Begleiter bei jedem Atemzug.
13. **Circulation** Fördert ein vitales Körpergefühl durch sanfte Unterstützung der Durchblutung.
14. **Resist** Unterstützt das innere Gleichgewicht und die natürliche Widerstandskraft
15. **Excrete** Fördert die natürliche Ausgewogenheit des Körpers und unterstützt das Loslassen von Stoffen und Molekülen die den Körper aus der Balance bringen können
16. **Assimilate** Unterstützt die innere Harmonie und das Gleichgewicht der Verdauung
17. **Pre Sport** Aktivierendes Programm zur Vorbereitung auf körperliche Aktivität
18. **Post Workout** Unterstützt die Regeneration nach sportlicher Betätigung
19. **Burn Down** Fördert den Abbau von unnötigen Polstern
20. **Build Up** Unterstützt ein vitales und gestärktes Körpergefühl und eine vitale Muskulatur
21. **Glow & Shine** Fördert ein frisches und ausgeglichenes Hautgefühl
22. **Smooth Skin** Glättet alle Wogen. Das Gewebe wird in eine natürliche Balance und Harmonie gebracht.
23. **Good Night** Unterstützt ein entspanntes Gefühl vor dem Einschlafen
24. **Male Vitality** Fördert das allgemeine Wohlbefinden und die innere Balance bei Männern.
25. **Female Vitality** Unterstützt das innere Gleichgewicht und das Wohlbefinden bei Frauen.

Weiterführende Hinweise und Informationen

Generelle Kontraindikationen:

- Herzschrittmacherträger
- Kleinkinder bis 6 Jahre
- Schwangerschaft
- Bösartige Tumorleiden
- Bösartige Bluterkrankungen
- Epilepsie
- Autoimmunerkrankungen
- Herzrhythmusstörungen
- Morbus Paget
- Glasknochenkrankheit
- Muskeldystrophie
- Frische Operationsnarben oder offene Wunden
- Hinweis für nicht-professionelle Anwender: Das Produkt darf nicht verwendet werden wenn psychische und / oder kognitive Einschränkungen und / oder eingeschränkte motorische Fähigkeiten vorliegen

Unerwünschte Nebenwirkungen

Unerwünschte Nebenwirkungen, welche im mittelbaren Zusammenhang mit dem Micu-Pocket stehen können, sind:

- verstärkte Wundsekretionsabsonderung
- Ein Kribbeln der Haut unterhalb der Klebe-Elektroden (bei hoher Empfindlichkeit des Anwenders auf Ströme)
- Rötung und Juckreiz der Haut unterhalb der Klebe-Elektroden (bei hoher Empfindlichkeit des Anwenders auf Ströme)
- Verstärkter Urindrang
- Bei Anwendung im Kopfbereich kann es zu Lichtblitzen in den Augen kommen. Von einer Anwendung im Kopfbereich wird ausdrücklich abgeraten!
- Anwendung der Elektroden in der Nähe des Brustkorbs kann das Risiko von Herzkammerflimmern erhöhen
- Die Mikrostrombehandlung darf nicht über oder durch den Kopf, direkt auf die Augen, unter Abdeckung des Mundes, auf der Vorderseite des Halses (insbesondere Karotissinus) oder mit auf der Brust und dem oberen Rücken oder das Herz kreuzend angebrachten Elektroden angewendet werden.
- Das Material der Gel Pads wurde nach EN 10993-1 auf Biokompatibilität geprüft, eine unerwünschte Reaktionen der Haut auf diese Materialien kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sollten hier Symptome auftreten, die Anwendung beenden und die Gel Pads abnehmen.

Anwender

- Das Micu-Pocket ist ein Mikrostrom Elektrogerät, das in erster Linie zur Regeneration und Performancesteigerung eingesetzt wird.

Geeignete Umgebungen

- Das Gerät ist für die Anwendung in häuslicher Umgebung vorgesehen.

Nicht geeignete Umgebungen

- In der Nähe von Hochfrequenz-Chirurgie Geräten, in unmittelbarer Nähe eines Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegerätes, innerhalb von geschirmten HF-Kabinen eines ME-SYSTEMS für Kernspintomographie.

Umgebungsbedingungen

- Das Gerät darf nicht in feuchter Umgebung oder an Orten, an denen es mit Flüssigkeit in Kontakt kommen kann, betrieben werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen direkten oder indirekten Hitzequellen aus.
- Das Gerät muss in einer sicheren Umgebung betrieben und aufbewahrt werden.
- Das Gerät kann in einem Temperaturbereich von +5°C bis +40°C und bis zu einer Höhe von 2000m über dem Meeresspiegel betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart von freiem Sauerstoff, Anästhetika oder entflammaren Substanzen. Das Gerät muss in einer sicheren Umgebung betrieben und aufbewahrt werden.
- Das Gerät kann Funkstörungen verursachen oder den Betrieb von Geräten in der Umgebung stören. Wenn dies passiert, sollte die Störung durch Neuausrichtung und Neupositionierung des Geräts oder durch Abschirmen der direkten Umgebung reduziert werden. Die vom Micu-Pocket erzeugten elektromagnetischen Strahlungen liegen unter den in den geltenden entsprechenden Bestimmungen (IEC 60601-1-2) festgelegten empfohlenen Grenzen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von oder auf anderen Geräten stehend sollte vermieden werden, da dies den Betrieb beeinträchtigen könnte. Wenn eine derartige Verwendung erforderlich ist, sollte dieses und das andere Gerät beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.
- Das Gerät erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und muss unter strenger Einhaltung der EMV-Richtlinie installiert und betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät insbesondere nicht in der Nähe von Leuchtstofflampen, Funksendern, Fernbedienungen oder tragbaren oder mobilen HF-Kommunikationsgeräten, auch wenn diese die CISPR-11-Anforderungen einhalten.
- Die Verwendung von anderen Zubehörteilen, Wandlern und Kabeln als den vom Hersteller dieses Geräts angegebenen oder gelieferten, können zu erhöhten elektromagnetischen Aussendungen oder einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit des Produkts führen und den Betrieb beeinträchtigen.
- Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten mindestens 30cm von sämtlichen Teilen des Micu-Pocket einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabeln und Zubehörteilen entfernt sein. Andernfalls könnte die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden.
- Um Beschädigungen am Gerät durch elektrostatische Entladung auszuschließen, vermeiden Sie Aufladung z.B. durch ungeeignete Kleidung oder ungeeignete Teppichböden. Hierzu zählen z.B. Textilien aus synthetischen Materialien, welche die elektrostatische Aufladung begünstigen. Ebenso kann eine zu geringe Luftfeuchtigkeit die elektrostatische Aufladung fördern. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich vor dem Berühren des Gerätes zu entladen, zum Beispiel durch Berühren eines Heizkörpers oder Wasserhahns.

- Es ist nicht auszuschließen, dass das Micu-Pocket den Betrieb von implantierten Geräten stört. Anwender mit entsprechenden Geräten sollten von einer Verwendung mit dem Micu-Pocket absehen.
- Führen Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen ein.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und desinfizieren Sie die Zubehörteile, falls dies erforderlich ist.
- Das Gerät, bei nicht Gebrauch, stets in der vorgesehenen Transportverpackung aufbewahren, um es vor Fussel, Staub und Sonnenlicht zu schützen.
- Das Gerät darf nur in trockenen Räumen bei einer Temperatur von -20°C bis +70°C gelagert werden.
- Das Gerät stets in der Transportverpackung fern von Haustieren, Schädlingen und Kindern lagern.

Während der Anwendung

- Wenn während der Anwendung Unregelmäßigkeiten am Gerät auftreten, schalten Sie es aus. Wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Servicepartner.

Zubehör

- Verwenden Sie nur Komponenten/Zubehör und Ersatzteile, die für das Micu-Pocket freigegeben sind.
- Verbinden Sie die Anschlussleitungen nur mit der dafür vorgesehenen Buchse am Gerät – führen Sie die Steckverbindungen der Anschlussleitung in keine anderen Geräte ein.
- Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darauf treten, oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie keine großen Kräfte, z.B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt sonst zu Schäden an und in Ihrem Gerät.
- Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln oder Steckern keine Gewalt an
- Vermeiden Sie Kurzschluss und Kabelbruch, indem Sie Kabel nicht quetschen oder stark biegen.

Reparaturen und Schäden (siehe auch Kapitel „Fehlerbehebung“)

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Beschädigungen oder einen Defekt vermuten.
- Sollte durch Unachtsamkeit Flüssigkeit in das Gerät oder in eines der Zubehörteile eingedrungen sein, ist der weitere Betrieb untersagt. Bitte senden Sie das Gerät und die Zubehörteile zur Überprüfung/Reparatur an den Hersteller.
- Reparaturen, Veränderungen und Modifikationen des Geräts sind ohne die vorherige Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Die MicuFlow UG und/oder Dr. Schwab GfT mbH können nicht haftbar gemacht werden, wenn das Gerät verändert oder modifiziert wurde. Wenn ein Defekt auftritt, wenden Sie sich an die MicuFlow UG oder Ihren autorisierten Servicepartner.
- Das Gerät ist so konstruiert, dass es nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug geöffnet werden kann,
- Das Gerät darf nur vom Hersteller geöffnet werden!
- Das Gerät besitzt einen intern verbauten Li-Ion Akku. Sollte der Akku schwach oder defekt sein, kann er beim Hersteller erneuert werden.



Wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten zu den Warnhinweisen an den Hersteller! Dieser gibt Ihnen gerne Auskunft und hilft Ihnen das Gerät sicher und erfolgreich anzuwenden.

Hinweise zur Anwendung

Die Haut des Anwenders sollte vor der Anwendung im Bereich der Klebeelektroden fettfrei und ohne Wunden sein. Evtl. aufgetragenes Make-Up o.ä. muss entfernt werden. Es ist sehr wichtig darauf zu achten, dass bei den Klebeelektroden auf der kompletten Anlagefläche die volle Klebewirkung vorhanden ist. Die Klebeelektroden müssen während der Anwendung mit ihrer gesamten Fläche auf der Haut aufliegen und dürfen nicht abfallen. Sollten die Klebeelektroden die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, sind diese durch neue Klebeelektroden zu ersetzen.

- bitte beenden Sie die Anwendung, wenn Ungewöhnliches passiert
- setzen Sie die Elektroden nicht über frische Operationsnarben und nicht über offene Wunden an
- vermeiden Sie den Kontakt der Elektroden mit Metallen wie Ketten oder Gürtelschnallen
- benutzen Sie keine verknoteten oder schadhaften Kabel
- falls Sie Zweifel bei der Anwendung haben, sollten Sie sich sachkundigen Rat einholen oder kontaktieren Sie die MucuFlow UG.
- Das Gerät darf nicht im Kopfbereich angewendet werden
- Eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren ist nur im Beisein eines Erwachsenen durchzuführen. Für Kinder unter 6 Jahren ist die Anwendung nicht geeignet.



Sollen die Gel-Pads von den Leitungen getrennt werden, ist stets darauf zu achten, dass die Trennung zuerst an der Verbindung zwischen Gel-Pads und Leitungen vorgenommen wird. Erst nach dieser erfolgten Trennung darf die Leitung vom Gerät getrennt werden.

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, lesen Sie die folgende Checkliste durch. Wenn Sie das Problem mit dieser Checkliste nicht lösen können, wenden Sie sich an Ihren Micu-Pocket Vertriebspartner, die MicuFlow UG.

Problem	Ursache / Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten, das Display bleibt dunkel	Akku leer Gerät mittig auf der Ladeschale positionieren und den Akku aufladen. Ladeschale defekt Ladeschale austauschen. Akku / Gerät defekt Gerät von autorisierten Fachhändler reparieren lassen.
Akku wird nicht geladen – weiße Ladeanzeige leuchtet nicht , wenn das Gerät auf der Ladeschale liegt.	Gerät liegt ggf. nicht mittig auf der Ladeschale Gerät mittig auf der Ladeschale positionieren. Ladeschale defekt Ladeschale austauschen. Akku defekt Akku von einem autorisierten Fachhändler tauschen lassen.
Verkürzte Laufzeit	Akku schwach Akku von einem autorisierten Fachhändler tauschen lassen

Garantie, Wartung und Ersatzteile, Reparaturen

Die Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH räumt Ihnen mit dieser Garantieerklärung (siehe „Aus-schlüsse“ und „Einschränkungen“) bestimmte, nach Art und Inhalt begrenzte Rechte ein. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch. Durch die Ausübung von aus dieser Garantie abgeleiteten Rechten erklären Sie, dass Sie deren Bedingungen verstanden und akzeptiert haben. Ihre gesetzlichen Rechte (Gewährleistungen) gegenüber der Partei, von der Sie dieses Produkt unmittelbar erworben haben, bestehen, ohne durch diese Garantie berührt zu werden, neben und unabhängig von dieser Garantie.

Die Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH garantiert, dass jedes „System“, das in einem Land des

Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz erstmalig von einem Händler an einen Endverbraucher verkauft wurde, bei normaler, nicht gewerblicher Verwendung für die Dauer von zwei Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Als „System“ gilt hier das fabrikneue Gerät zuzüglich aller Originalanbauteile und Komponenten (sofern diese zum Kaufzeitpunkt als „Optionen“ und/oder „Zubehör“ angeboten wurden und bereits im Zusammenhang mit dem Kauf Ihres Gerätes installiert wurden). Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Klebeelektroden, Anschlusskabel- und Lichtleitungen sowie der Akku.

Im Garantiefall repariert oder ersetzt die Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH nach billigem Ermessen schadhafte, von dieser Garantie gedeckte Systeme oder Teile durch neue oder neuwertige Teile oder Systeme. Sollte der Hersteller neuwertige Teile oder Systeme verwenden, so handelt es sich dabei um generalüberholte Originalteile, deren Leistungsmerkmale denen fabrikneuer Produkte gleichkommen. Alle ausgetauschten Teile und Systeme, die im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie ersetzt werden, gehen in das Eigentum der

Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH über.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufes. Eine Rechnung mit dem Erwerbsdatum des Gerätes gilt als Kaufbeleg.

Ausschlüsse und Einschränkungen

Diese eingeschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf:

Produkte, die durch folgende Handlungen beschädigt oder funktionsunfähig gemacht wurden:

- Zweckentfremdete Verwendung des Produkts, einschließlich aber nicht beschränkt auf Nichtbeachtung der mit dem System gelieferten Benutzeranleitung oder anderer Missbrauch oder Vernachlässigung des Systems
- Veränderung des Systems
- Service oder Reparatur durch nicht autorisierte Dritte, d.h. nicht von der Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH oder einem Vertriebspartner.
- Unsachgemäßer Transport oder Verpackung bei Rücksendung des Systems an die Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH oder deren Vertriebspartner.

Des Weiteren sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Verbrauchsmaterialien, d.h. Teile, die bei der normalen Nutzung des Systems regelmäßig ausgetauscht werden müssen, einschließlich aber nicht ausschließlich Klebeelektroden, Anschlusskabel- und Lichtleitungen und Akku.

Gewährleistung des Händlers

Der Inverkehrbringer haftet im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung, gerechnet ab Übergabe der Ware/Rechnungsstellung/Zahlungseingang für Mängel an neuen Geräten für die Dauer von 2 Jahren. Für den Umfang der gesetzlichen Gewährleistung gelten die jeweiligen, länderspezifischen Regelungen.

Wartung und Ersatzteile

Die zu erwartende Betriebs-/ Lebensdauer des Mikrostromgeräts Micu-Pocket und der liegt bei 10 Jahren. Der Akku ist ausgelegt auf ca. 500 Lade-/Entladezyklen. Die Gel-Pads sind Verbrauchsmaterialien und sollten nach jeder Anwendung erneuert werden.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an den Kundendienst der MicuFlow UG.

Kontakt Daten MicuFlow UG

info@micuflow.de

+49 175 7473763

Ehe Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, sollten Sie versuchen, das Problem erneut hervorzurufen und sämtliche Zubehörteile überprüfen, um sie als Ursache für das Problem auszuschließen.

Halten Sie für das Telefonat folgende Informationen bereit:

- Produktname, Modellnummer und eine vollständige Beschreibung des Problems
- Die Seriennummer des Produkts
- Ihren Namen sowie die vollständige Anschrift und Telefonnummer

Reparaturen

Wenn für Ihr Produkt Garantiereparaturen, erweiterte Garantiereparaturen oder garantieunabhängige Reparaturen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte zunächst an den technischen Kundendienst der MicuFlow UG. Ein Kundendienstmitarbeiter wird Ihnen bei der Identifizierung des Problems helfen und versuchen, das Problem nach Möglichkeit über das Telefon zu beheben, um unnötige Rücksendungen zu vermeiden.

Falls eine Rücksendung unumgänglich ist, wird der Kundendienstmitarbeiter alle notwendigen Informationen erfassen und Ihnen eine korrekte Rücksendeadresse nennen.

Hinweise zur Verpackung

Wenn Sie Produkte zur Wartung oder Reparatur zurücksenden müssen, befolgen Sie die nachfolgenden Richtlinien

zur Verpackung:

- Verwenden Sie nach Möglichkeit den Originalkarton sowie die Originalverpackungsmaterialien.
- Senden Sie sämtliche Kabel und Zubehörteile, auch wenn Sie annehmen, dass sie nicht an dem Problem beteiligt sind.
- Legen Sie eine Packliste und eine möglichst präzise Fehlerbeschreibung bei

Wir empfehlen, alle zurückgesendeten Produkte zu versichern. Ansprüche wegen Verlust oder Beschädigung des Produkts müssen vom Sender gestellt werden.

Hinweise zur eingeschränkten Garantie

Die Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung garantiert, dass das von Ihnen erworbene Produkt den genannten technischen Daten des Produkts entspricht und frei von technischen Material- und Fertigungsfehlern ist, die innerhalb von einem Jahr, ab Kaufdatum auftreten. Für Zubehör, das mit dem Produkt verwendet wird, gilt ebenso eine Garantie von 1 Jahr ab dem Kaufdatum.

Das Kaufdatum wird wie folgt definiert: 1.) Das in unseren Aufzeichnungen angegebene Datum, wenn Sie das Produkt direkt bei uns erworben haben; 2.) Das an uns durch einen Zwischenhändler übermittelte Datum, wenn Sie das Produkt nicht direkt bei uns erworben haben.

Diese Garantie deckt keine Schäden, die durch folgendes verursacht wurden: 1.) Handhabung während des Transports; 2.) Verwendung oder Wartung, die nicht den Anleitungen entsprechen; 3.) Änderungen oder Reparaturen durch einen nicht von der Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung autorisierten Techniker; und 4.) Unfälle

Wenn ein durch diese Garantie gedecktes Produkt oder Zubehör aufgrund defekter Materialien, Komponenten oder aufgrund schlechter Verarbeitung beschädigt ist und die Garantie innerhalb des o. a. Garantiezeitraums in Anspruch genommen wird, wird das beschädigte Produkt oder Zubehör kostenfrei repariert oder ersetzt. Die Entscheidung hierüber liegt bei der Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung.

DIESE GARANTIE SCHLIESST ALLE ANDEREN GARANTIEEN, GLEICH OB AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE VERPFLICHTUNG DER DR. SCHWAB GESELLSCHAFT FÜR TECHNOLOGIEBERATUNG MBH GEMÄSS DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT SICH AUF REPARATUR ODER ERSATZ DES BESCHÄDIGTEN PRODUKTS. DIE DR. SCHWAB GESELLSCHAFT FÜR TECHNOLOGIEBERATUNG MBH IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUFGRUND EINES DURCH DIESE GARANTIE GEDECKTEN PRODUKTFEHLERS ENTSTANDEN SIND.

Hinweise zur Verpackung und Entsorgung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.



Elektrogeräte mit diesem Zeichen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden – Bitte beachten Sie die jeweilige Elektrogeräte-Abfall Gesetzgebung Ihres Landes



RoHS 2011/65/EU conform



**Das Gerät beinhaltet einen Li-Ion Akku.
Das Material des Akkus entspricht den derzeit gültigen Richtlinien und Normen.**

Technische Daten

Produkt:	Micu-Pocket (PMD2-MC-01)
Produkttyp:	Mikrostromgerät
Materialtyp:	Alugehäuse mit Glasfront und Glasboden
Schutzart Gehäuse:	IP22
CE-Kennzeichnung:	CE
Abmessungen:	B x T x H: 100.0 x 72.0 x 22.0 (mm)
Gewicht:	200 g (ohne Zubehör)
Akkuladung:	kontaktlos über die mitgelieferte Ladeschale, oder jeden anderen, handelsübliche Wireless Charger mit Qi Standard
Stromaufnahme max:	2.5W
Akku:	Li-Ion 3.7V 660mAh VARTA 1/LPP 443441S PCM W
Transport/Lagerung:	-20°C - +30°C bei Relativer Luftfeuchte von 45% - 85% (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur Betrieb:	+5°C - +40°C
Relative Feuchte Betrieb:	45% - 85% (nicht kondensierend)
Luftdruck Betrieb:	700 – 1060 hPa
Ausgänge Patient:	1 x Mikrostrom
Ausgangsstrom Patient:	10µA – 999µA in 1µA Schritten
Ausgangsspannung Patient (max.):	60V
Ausgangsfrequenz Patient:	0,1Hz – 1kHz in 0,1Hz Schritten

Erstellt durch:

Dr. Schwab Gesellschaft für Technologieberatung mbH

Carl-von-Linde-Str. 15

85716 Unterschleißheim